

Sonda Sebumeter® para MPA

Medidor de grasa superficial de la piel, cabello y cuero cabelludo.



El respaldo científico en consulta cosmética.

La medición exacta de grasa en la superficie de la piel, cabello y cuero cabelludo son indispensables para un análisis seguro del tipo de piel y de cabello así como una correcta comprobación de si un producto está funcionando en esa persona o no..

Con el SEBUMETER® se dispone del sistema ideal para el diagnóstico científico de la piel y del cabello de sus clientes. Midiendo previamente el contenido de grasa superficial, se puede medir la efectividad de un producto.

PRINCIPIOS DE MEDICIÓN

Dentro de la Unidad básica MPA a su elección existe un fotómetro y tiene un aditamento externo, **el cassette sebumeter**, para la determinación de grasa superficial. La determinación se realiza colocando durante 30 seg. un segmento de la cinta plástica del cassette sobre la superficie de piel en la zona que se desea medir la grasa superficial, generalmente la parte central de la frente, de la barbilla o bien de los pómulos. La cinta absorbe la grasa presente en la superficie de la piel. El cassette entonces, se introduce en el alojamiento del aparato donde una lámpara ilumina la cinta plástica por la parte opuesta al fotómetro haciendo posible la medición con base al contenido de grasa. El cassette es inerte a la piel.

Este modelo de equipo está diseñado para predicción del nivel de grasa en la piel para uso científico y en desarrollo de productos dermatológicos y formulaciones cosméticas.

